



Dimanto®

PULIDOR DE DIAMANTE DE UN PASO PARA EL
PREPULIDO Y PULIDO A ALTO BRILLO DE COMPOSITOS

PULIDO A ALTO BRILLO – RÁPIDO Y EFICIENTE

Los pulidores Dimanto de un paso y rellenos con diamante de VOCO son muy apropiados para el rápido prepulido y pulido a alto brillo de composites, especialmente aquellos de reciente generación. Los composites modernos ofrecen además de la mejor estética la más alta resistencia y dureza superficial. Por ello, se necesitan pulidores que resistan la dureza del composite, que alisen la superficie y que consigan al mismo tiempo un brillo visible.


Óptima calidad superficial

Los pulidores de silicona entremezclados con polvo de diamante microfino logran en muy corto tiempo una muy alta lisura superficial y hacen brillar duraderamente las restauraciones de composite. Dado que la calidad superficial de

la restauración tiene un efecto inmediato en la adhesión de placa, resistencia a la abrasión y decoloración influye en la durabilidad de su restauración. Restauraciones pulidas a alto brillo contribuyen así en la mayor satisfacción del paciente.

Lisura superficial R_a [μm]

Lisura superficial de diversos composites después del pulido con pulidores recomendados y con Dimanto

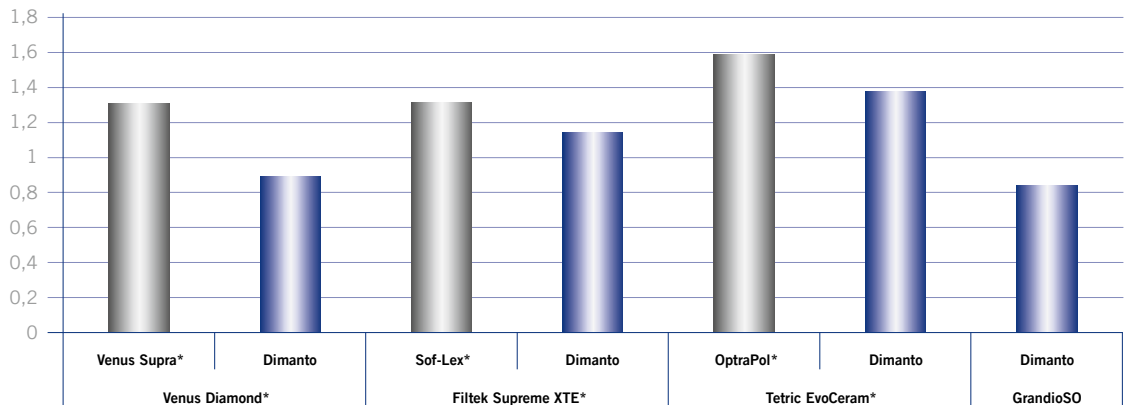

*no son marcas registradas de la casa VOCO GmbH.

Fuente: VOCO GmbH, mediciones internas, datos en acta

Pulidor de un paso para una alta eficiencia

Con Dimanto le ofrecemos las mejores condiciones para un trabajo eficiente en material y tiempo. Se consigue un gran ahorro de tiempo tanto por el uso de sólo un pulidor para el prepulido y pulido a alto brillo así como por el uso de partículas de diamante especiales. Modificando la cantidad de presión ejercida puede determinar el efecto de remoción del pulido y producir así el prepulido hasta el alto brillo sin tener

que cambiar el pulidor y conseguir así superficies extremadamente lisas y brillantes. El desarrollo de Dimanto tuvo como objetivo pulidores de adecuada relación costo - beneficio. Los pulidores son de uso múltiple y pueden ser esterilizados a 134°C en autoclave de vacío. Además se ahorra el uso de pastas de diamante para pulido gracias a la granulación de diamante de los pulidores.



Fuente: Dr. Walter Denner, Fulda/Alemania

Dimanto®

UNIVERSAL Y PRECISO

Los pulidores de Dimanto están disponibles en 5 formas diferentes: punta pequeña y grande, copa pequeña y grande así como lente. Con estas formas probadas clínicamente se puede pulir cada restauración de composite en forma simple, eficiente y rápida, también en los áreas proximales críticas y en surcos reconstruidos con composite.

Formas orientadas a la práctica

Los pulidores de silicona rellenos con diamante están coordinados con las propiedades y la dureza superficial de composites modernos (nano-)híbridos: la rigidez está adaptada para materiales de restauración de alta resistencia, Dimanto

es tan flexible que también se puede trabajar sin problemas sobre superficies complejas. Las formas de pulidores disponibles apoyan también el uso en la práctica.



Punta:

La forma aguda es suministrada en dos tamaños diferentes. Estas formas son ideales tanto para trabajar el relieve oclusal así como para el área crítica del cuello del diente.



Copa:

Restauraciones con cúspides y de gran superficie, y las transiciones de vestibular a palatino son los ámbitos de aplicación de la copa. También están disponibles dos tamaños diferentes.



Lente:

La lente es ideal para restauraciones de grandes superficies sin forma anatómica especial, bordes cortantes y transiciones en los áreas proximales.

Dimanto®

PULIDOR DE DIAMANTE DE UN SÓLO PASO

Indicaciones

Prepulido y pulido a alto brillo de restauraciones de composite


Ventajas

- Muy buenos resultados de pulido
- Apropiado para todos los composites – también de la más nueva generación
- Rellenos con diamante para un pulido eficiente
- Uso de instrumentos minimizado, prepulido y pulido a alto brillo con sólo un pulidor
- Autoclavable y así utilizable múltiples veces
- Disponible en 5 formas diferentes para el pulido preciso e individual
- Puede ser utilizado con y sin spray de agua refrigerante



Presentaciones

REF 2380	set 5 u. mixto
REF 2381	10 u. punta pequeña
REF 2382	10 u. punta grande
REF 2383	10 u. copa pequeña
REF 2384	10 u. copa grande
REF 2385	10 u. lente

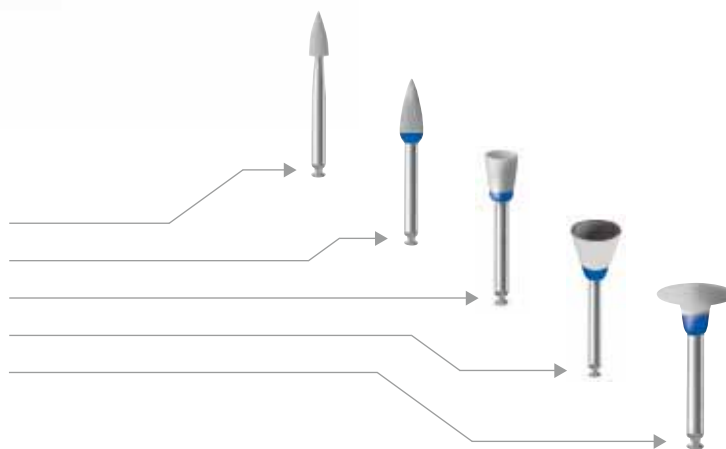

VOCO GmbH
P.O.Box 767
27457 Cuxhaven
Alemania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com

Distribuidor: