

VOCO

Remin Pro®

ES

USA/E

Instrucciones de uso

Remin Pro es una crema de base acuosa que contiene hidroxiapatita, fluoruros de sodio (1.450 ppm de fluoruros) y xilitol. **Remin Pro** está disponible en los sabores melón, fresa y menta. **Remin Pro** produce una protección extra para los dientes y ayuda adicionalmente a neutralizar los ácidos de las bacterias en la placa dental. **Remin Pro** colabora también en la neutralización de otros ácidos en la boca.

Indicaciones:

- Después del blanqueamiento
- Después de la limpieza dental profesional
- Prevención y control de hipersensibilidades
- Durante un tratamiento ortodóntico

Aplicación:

1. Aplicar **Remin Pro** – en cantidad de una alubia – con el dedo o un instrumento apropiado (cepillo o goteador) en los dientes y distribuir.
2. El **Remin Pro** restante debe ser distribuido con la lengua en la boca; para un resultado óptimo deberían permanecer **Remin Pro** y la saliva el mayor tiempo posible en la boca (por lo menos 3 minutos).
3. Salivar los restos; a ser posible se debería evitar un enjuague. El paciente debería comer o beber no menos de 30 minutos después del tratamiento.

También para el uso diario después de la limpieza dental.

Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol (4°C - 23°C / 39°F - 73°F). El material no se debe utilizar después de la fecha de caducidad.

Precauciones:

1. **Remin Pro** contiene parabenos. **Remin Pro** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes.
2. Cerrar el tubo inmediatamente después del uso.
3. No se recomienda el uso en pacientes menores a 6 años así como el uso doméstico en niños menores a 12 años.
4. En caso del contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua corriente y contactar a un médico.
5. En caso de que se presenten síntomas de un angioedema que se podría imputar a los componentes de **Remin Pro**, se debería interrumpir inmediatamente el tratamiento y contactar a un médico.

Este material se desarrolló exclusivamente para el uso del odontólogo. El proceso debe ser como está indicado en la información de uso. VOCO reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se muestran que están defectos. VOCO no acepta la responsabilidad de cualquier

perjuicio o pérdida que descenden del uso o de la incapacidad de usar los productos descritos. Antes de usarlo, es la responsabilidad del utilizador de determinar lo adecuado del producto para su uso intentado. El utilizador supone todo el riesgo y la responsabilidad en conexión con eso. Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía y no son aglomerantes.

Atención: La legislación americana registre este dispositivo para venderlo o al pedido del dentista.

Ninguna persona está autorizada de proveer ninguna información que desvíe de las informaciones provéidas en esta información de uso.

Para preguntas o comentarios, por favor, llámen al 1-888-658-2584.

Mántengase fuera del alcance de los niños. Solamente para el uso odontológico.

La explicación de los símbolos usados en el etiquetado puede ser encontrada en www.voco.com/us/symbols