

VOCO

Registrado® X-tra

ES

Instrucciones de uso

Descripción del producto:

Registrado X-tra es un material de impresión de silicona reticulante por adición para el registro de mordida, el cual se destaca por la, en extremo, alta dureza final y su fraguado muy rápido.

La alta estabilidad impide un fluido de la línea dental y posibilita una aplicación en capas más gordas. La fórmula de endurecimiento especialmente dirigida por la temperatura permite una aplicación sin premura de tiempo y una estancia en la boca de solamente 40 s por la cual se puede sacar con seguridad el registro sin romper o sin dar de sí.

Registrado X-tra se puede elaborar fácilmente y controladamente después del endurecimiento con un escalpelo o una fresa y resta permanentemente con una estabilidad dimensional.

Indicaciones:

Registrado X-tra es apropiado para registros de mordidas oclusales, fijaciones en casos registros de arcos faciales, para cierres de registros de espigas de apoyo.

Aplicación:

1. Preparación:

Utilizar el dispensador **VOCO** del tipo 2 u otro dispensador con émbolo apropiado.

Por razones técnicas se producen pequeñas diferencias de llenado de ambas cámaras del cartucho. Por lo tanto, retirar el cierre del cartucho después de colocar el cartucho en el dispensador tipo 2 y estrujar el material hasta que salga uniformemente de ambos orificios del cartucho.

Restos de otros materiales (p. ej. materiales de impresión) o soluciones pueden perturbar el fraguado, por lo que deberán removerse antes de la aplicación (p. ej. echar espray).

Colocar la cánula de mezcla tipo 16 y estrujar el material impeliendo el disparador. El material se mezcla automáticamente y completamente en la proporción correcta en la cánula.

Para una aplicación más fácil se puede colocar una punta de aplicación del tipo 2 sobre la cánula de mezcla del tipo 16.

Después del uso, poner de nuevo el cierre del cartucho. Antes de cada uso se debe controlar el orificio de salida. En caso de que la apertura esté taponada, destaponarla y esparcir una cantidad pequeña hasta que las dos pastas salgan uniformemente.

2. Elaboración:

Para el registro de la mordida oclusal se aplica directamente **Registrado X-tra** en el arco dental superior e inferior del paciente.

Registrado X-tra puede trabajarse durante aprox. 30 s (a partir del comienzo de la mezcla a temperatura ambiente de 23 °C) y dejar el material en la boca por 40 s para asegurar el fraguado completo.

Indicaciones, medidas de prevención:

Evitar el contacto con el material que no esté endurecido con la ropa. No utilizar junto con siliconas enredadas por condensación. Guantes de látex, soluciones de enjuagues y de retracción también pueden dificultar la reacción de fraguado. Se recomienda una desinfección de los registros con un desinfectante aguado.

Las propiedades prometidas del producto se conseguirán sólo bajo el uso de las cánulas de mezcla originales Sulzer Mixpac, autorizadas de **VOCO**. Nosotros, **VOCO**, disponemos de todas las cánulas de mezcla correspondientes para nuestros productos.

Registrado X-tra contiene polidimetilsiloxanos y un catalizador de platino. **Registrado X-tra** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes.

Conservación:

Conservar a temperaturas entre 4 °C - 23 °C. No utilizar después de la fecha de caducidad.