



# GREEN&CLEAN ID N

## Desinfección de instrumental

GREEN&CLEAN ID N



**1**  
Dosificación del concentrado, p.ej. para 3 litros  
30 ml: solución al 1%  
60 ml: solución al 2%  
225 ml: solución al 7,5%



**2**  
Llenar la cubeta con 3 litros de agua fría (marca) y agregar el concentrado



**3**  
Sumergir completamente los instrumentos en la solución, sin formar burbujas



**4**  
Tapar la cubeta y dejar transcurrir un período de acción: 1%: 60 min.  
2%: 15 min.  
7,5%: 5 min.



**5**  
Enjuagar a fondo el instrumental con agua y secarlo

### Realización de la desinfección por inmersión:

- Quita de los instrumentos las suciedades gruesas y desarmarlos en caso necesario
- El tiempo de acción comienza después de sumergir el último instrumento
- Observar exactamente la dosificación y el tiempo de acción
- Cuidado con objetos puntudos y filosos
- Utilizar guantes de protección

### GREEN&CLEAN ID N: Concentrado para desinfección de instrumentos y brocas

- 5 l de concentrado proporcionan hasta 500 l de solución aplicable\*
- Con protección anticorrosiva, probada en cuanto a compatibilidad de materiales
- Virucida limitado, (por ejemplo, hepatitis B/hepatitis C/VIH, virus del herpes simple Tipo I), bactericida/fungicida, tuberculocida
- Apta para todos los instrumentos y brocas corrientes
- Posibilidad de utilización en baño de ultrasonido\*
- Recomendada por Karl Storz Endoskope y NTI Kahla
- Listada en DGHM/VAH, CE-0408

\*;Observe las indicaciones del fabricante sobre dosificación y tiempos de acción!  
Recomendación: solución al 1%, tiempo de acción 60 minutos (en baño de inmersión).